

Vivago DOMI

trygghetstelefon
Bruksanvisning

Vivago



Innehålls- förteckning

Vivago DOMI bruksanvisning.....	1
Innehåll	2
Vad är Vivago DOMI?	
Vivago CARE -klocka	3
Domi POINT -trygghetstelefon	3
Larmmottagning	3
Vivago DOMI -funktioner	
Vivago CARE -klockans tryckknappslarm	4
Inställningar för larmmottagning	4
Larmtyper.....	4
Vivago CARE -klockans knappfunktioner	4
Knappar, högtalare och mikrofon	5
Signaler och ljus	5
Talkontakt	5
Instruktioner för larmmottagaren	5
Vivago CARE -klockans funktioner	
Automatiska larm	6
Automatiska meddelander	6
Självdagnostik.....	6
Kopplingsenhet.....	7
Användningen av CARE-klockan	
Inställningar	8
Att sätta fast Vivago CARE -klockan.....	8
Att ta av Vivago CARE -klockan.....	8
Dusch, bad och bastu.....	8
Rengöring	8
När man går ut.....	8
Långvarig frånvaro.....	8
Laddning	9
Service, ansvar och garanti	
Service	10
Ansvar	10
Garanti	10
Vivago DOMI programmering	
Domi POINT programmering	10
Domi POINT placering.....	10
Domi POINT räckvidd.....	10
Vivago CARE -klockans allmänna instruktioner	11
Bilaga 1:	
Larmtyper och inställningar av Vivago DOMI	12
Bilaga 2:	
Kopplingsenhet och Vivago DOMI	13
Bilaga 3:	
Dokument	13
Kontaktinformation	14



Vad är Vivago DOMI?

Vivago DOMI -trygghetstelefonpaketet innehåller Vivago CARE -klocka, Vivago Domi POINT -trygghetstelefon och Vivago Vista -mjukvara. Återförsäljaren ansvarar för underhållningen av servern samt mjukvaran och dess inställningar.

Domi POINT -trygghetstelefonen överför alarmen till larmmottagaren via servern och mobilnätverket.

Vivago DOMI innehåller följande delar:



1 Vivago CARE -klocka, som du hela tiden bör bära runt handleden. Ta inte av den när du går i säng eller går ut. Klockan har sensorer, som mäter användarens aktivitetsnivå. När klockan märker betydande förändringar i aktivitetsnivån, sänder den automatiskt ett larm. Genom att trycka på klockans Vivago-knapp kan du även kalla själv på hjälp.

Obs. Larmen från klockan förmedlas vidare endast när användaren befinner sig inom basenhetens räckvidd, som är ca 20 meter inomhus.

Klockan kan användas som en vanlig klocka. Den visar tiden, datumet samt fungerar som väckarklocka. Man kan också från klockan följa med information som den mätt, som förra nattens sömntid och hur mycket man rörde sig förra dagen.

Tar man av sig klockan, mäter den inte aktivitet och kan inte sända automatiska alarm. Tryckknappslarmet fungerar trots att klockan inte är på armen så länge du är innanför trygghetstelefonens räckvidd. Om användaren känner att han/hon behöver hjälp, skall han omedelbart trycka på klockans Vivago-knapp.

Vivago DOMI -trygghetstelefonen kan ha max. 2 klockor kopplade till den, till exempel för ett par som bor i samma lägenhet.



2 Domi POINT, som kontinuerligt tar emot information från klockan. Trygghetstelefonen granskar larmen och skickar dem via mobilnätet till larmmottagaren. Efter detta kan mottagaren prata med dig genom hörgtalaren som finns inne i trygghetstelefonen.

Domi POINT -trygghetstelefonen behöver ström och bör vara kopplad till ett vägguttag. I fall det sker elavbrott har Domi POINT ett reservbatteri som håller i två dagar (48h). Batteriet laddas automatiskt då Domi POINT kopplas till ett vägguttag. Rekommendationen är att Domi POINT placeras på en central plats i lägenheten så att räckvidden är tillräcklig överallt i lägenheten, t.ex i tamburen eller i sovrummet.



3 Alarmmottagaren, som tar emot larm och meddelanden. Han/hon kan vid behov skaffa hjälp åt dig. Larmmottagaren kan vara en person vid larmmottagningscentralen, en familjemedlem eller en vän*. Kom överens om larmmottagarna med Vivagos återförsäljare.

(*Om du vill ändra tiden, kontakta återförsäljaren. Han kan vid behov ändra tidsgränserna med distansprogrammering.)

Vivago DOMI funktioner

Vivago CARE -klockans tryckknappslarm

Om du känner att du behöver hjälp, tryck genast på klockans tryckknapp Bild 1a. tills klockans röda ljus blinkar till Bild 1b. Vänta inte på att larmet går automatiskt.

Domi POINT ger en ljudsignal när larmet är skickat.

Tryckknappen fungerar oberoende om klockan sitter runt handleden eller ej. Du kan även trycka på den röda knappen på Domi POINT, se Bild 2 eller på andra larmenheter som är kopplade till Domi POINT.



Figure 1a. Vivago-knapp

Ifall du tryck på larmknappen av misstag, du kan upphäva alarmet inom 15s* genom att trycka på STOP-knappen på Domi POINT, se Bild 2.

Larmmottagning och inställningar

Vivago DOMI kan konfigureras med olika larmmottagare, larmtyper och inställningar för larm, bl.a dag/natt inställningar samt fördröjning för vissa larm. Inställningar kan ändras när det behövs. Kom överens med Vivagos återförsäljare om inställningarna före enheten tas i bruk.

Alarmtyper som kan justeras är uppräknade i Bilaga 1.

Larmtyper

Följande tabell visar alla larmtyper:

En mer detaljerad lista av alarm finns i Bilaga 1.

Alarmtyper

Tryckknappslarm

Automatiska alarm

Automatiska meddelanden om ändringar i välmåender

Tekniska alarm som informerar om klockans och basstationens funktion.

Information om användingar: Klockan på/av

Användaren hemma

Vivago CARE -klockans knappfunktioner

1 Vivago-knappen fungerar som larmknappen på klockan, förutom då när du är i inställningsläget.

2 Light-knappen tändar bakgrundsljuset. Ljuset släcks automatiskt om 15 sekunder.

3 Mode-knappen bläddrar mellan olika inställningsmenyer.



Bild 1b. Vivago CARE -klocka

(*=Kontakta Vivago återförsäljaren om du vill ändra på tiden)

Vivago DOMI funktioner

Knappar, högtalare och mikrofon

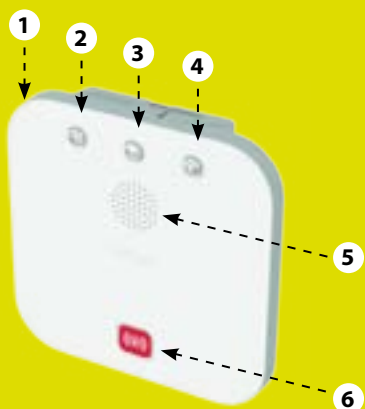


Bild 2. Domi POINT trygghetstelefon

Knappar/funktion

- 1 Mikrofon
- 2 Vårdare in
- 3 Stop
- 4 Vårdare ut
- 5 Högtalare
- 6 Alarm

Dom POINT signaler och ljus

Situation	Signal	Led-ljus
Strömkällan kopplad.	Signalljus var fåtal sekund.	Blåa ljuset blinkar med låg frekvens.
Trygghetstelefonen initialiserar sin funktion.	Ingen signal.	Blåa ljuset blinkar.
Trygghetstelefonen i bruk.	Ingen signal.	Blåa ljuset på.
Ett larm har gjorts med klockan eller trygghetstelfonen.	Signal för en kort stund.	Röda ljuset på.
Samtal.	Ljussignal tills någon svarar.	Ingen ändring.

Talkontakt

När Vivago du gjort ett larm med CARE-klockan, skickas det vidare till larmmottagaren via Vista-servern och mobilnätverket. Efter att larmmottagaren kvitterat larmet kan han/hon diskutera med dig via högtalaren och mikrofonen på Domi POINT.

Vårdaren eller larmmottagaren kan också ringa till Domi POINT med en vanlig eller mobiltelefon. I detta fall ger Domi POINT en signal. Du kan acceptera samtalet genom att trycka på Vivago CARE-klockans Vivago-knapp tills det röda ljuset på klockan blänker. Talförbindelsen kan också öppnas genom att trycka på Domi POINT-trygghetstelefonens röda larmknapp.

När talförbindelsen är öppnad, kan larmmottagaren justera högtalarens volym på Domi POINT genom att trycka på 4 eller 6 på telefonens siffer-tangentbord (4 = ner; 6 = upp).

Instruktioner för larmmottagaren

Larmmottagaren mottar larmet som ett textmeddelande. Larmmottagaren kan öppna talkontakt genom att svara på textmeddelandet med de bokstäver som står i textmeddelandet, t.ex. Av. När larmet har kvitterats ringer Domi POINT till larmmottagaren. När larmmottagaren svarar på samtalet öppnas talkontakten.

Det är även möjligt att sätta upp en återuppringningsfunktion på Domi POINT-trygghetstelefonen. Detta möjliggör att larmmottagaren kan ringa upp Domi POINT under de följande 15min* efter att hon/han kvitterat larmet och talkontakten öppnas automatiskt.

Vi rekommenderar att larmmottagaren sparar Domi POINTens telefonnummer i larmtelefonen. På detta sätt vet han/hon alltid vem som ringer och har möjlighet att ringa personen vid behov.

Om larmmottagaren inte vill öppna talkontakt, kvitterar han/hon meddelandet genom att svara på meddelandet med de bokstäver som står i meddelandet, t.ex. A.

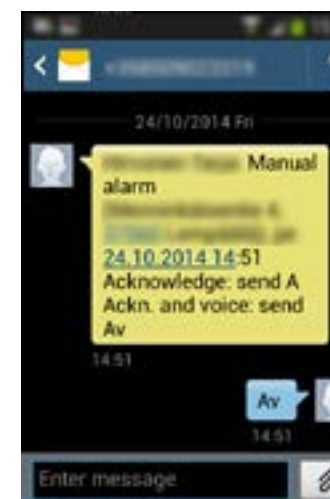


Bild 3. Larmtextmeddelande

(* = För att ändra på inställningar kontakta Vivagos återförsäljare.)

Vivago DOMI CARE-klockans funktioner

Automatiska larm

Vivago DOMI -trygghetstelefonen skickar automatiska larm i följande situationer:

1 "Avvikande tillstånd" skickas när klockan märker att du varit orörlig 30 min* längre än normalt på dagen och 1h på natten.

När du börjar använda klockan börjar den lära sig din normala dygnsrytm. Under de första dagarna då klockan först lär sig kan det hända att det uppstår falska larm. Även senare är det möjligt att falska larm uppstår, t.ex. då om det sker en ändring i din dygnsrytm. Klockan lär sig hela tiden vilket betyder att lärnings- och adaptionsfasen pågår även efter de första dagarna.

2 "Temperatur" skickas när klockan märker att temperaturen på handleden har sjunkit till 28°C (82 F), och aktiviteten har varit låg under de senaste 30 minuterna.

Automatiska meddelande

1 "Låg dagsaktivitet" skickas om genomsnittliga aktiviteten under dagtid har sjunkit under de senaste dagarna jämfört med det tidigare (från 8:00 till 20:00). Larmmottager kan kontakta dig och fråga hur du mår.

2 "Svag dygnsrytm" skickas om dygnsrytmen (förhållandet mellan dagsaktivitet och sömn) har blivit svagare under de senaste dagarna. Larmmottagaren kan kontakta dig och fråga hur du mår.

3 "Passivitet" skickas när klockan märker att du varit passivare under en längre stund på dagen, t.ex. du varit aktiv väldigt lite. Meddelandet skickas t.ex. när du sovit 4-5 h under dagen mellan 10.00 och 20.00.

Självdagnostik

The Vivago DOMI -trygghetstelefonen monitorerar hela tiden sin egen funktion. Om den märker ett problem skickar den automatiskt ett meddelande om händelsen till larmmottagaren. Till exempel om strömkällan dras ut från vägguttaget ger Domi POINT en ljudsignal om detta var femte sekund. Det är möjligt att tysta ner signalen genom att trycka på STOP-knappen på Domi POINT. Följande gång ges signalen om 2h. Om strömbavbrottet sker under nattetid (22:00-8:00) ges ingen ljudsignal. Signalljudet tystas ner automatiskt då Domi POINT får ström igen.

Vivago CARE-klockan och Domi POINT -trygghetstelefonen skickar automatiskt meddelanden då batteriet håller på att ta slut. Domi POINT trygghetstelefonen skickar ett "Basstationen nätsrömsavbrott" larm en timme efter Domi POINT tagits ur vägguttaget.

(* = Ifall du vill ändra på inställningarna, kontakta Vivagos återförsäljare.)

Kopplingsenhet

Kopplingsenhet

Med hjälp av kopplingsenheten är det möjligt att ta i bruk extra larmenheter, dörrvakt och andra tredje parts enheter. Bilaga 2 innehåller en lista på kopplingsenheter för Vivago DOMI.



Bild 4. Domi POINT, kopplingsenhet och touch pad



Bild 4b. Kopplingsenhet som dörrvakt.

Användningen av Vivago CARE -klockan

Inställningar

Se igenom Snabbguiden som kommer med i samma paket som Vivago CARE -klockan. Andra nyttiga manualer finns uppräknade i Bilaga 3.

Att sätta fast CARE-klockan

Om du är högerhänt, spänn fast klockan runt vänstra handleden. Om du är vänsterhänt, spänn fast klockan runt högra handleden. Spänn fast klockan så att den känns behaglig och så att den inte förhindrar handledens rörelser. Den bör ändå vara tillräckligt spänt, så att klockans bakskena är i ständig kontakt med huden, även då du rör på din hand. Klockan kan endast registrera din aktivitetsnivå om den är i ständig kontakt med huden. Om klockan är för lös sänder systemet ett Kontrollera klockan eller Klockan lös –larm och texten WRIST blinkar på klockdisplayen.

Beakta att klockan skall vara i ständig kontakt med huden, sätt inga textilier mellan klockan och huden. Om andra handen är förlamad, använd klockan på den icke-förlamade armen så att aktivitetsmätningen och automatiska larmen är så pålitliga som möjligt. Kontrollera att du kan göra ett larm. En Vivago-gummibit (kan köpas från Vivago återförsäljare) kan fästas på Vivago larmknappen. Gummibiten hjälper dig att göra larm genom att trycka knappen mot en hård yta, t.ex. bord eller vägg. Om du måste använda klockan på den förlamade armen, automatiska larm kan inaktiveras.

Kom överens om inställningarna med Vivago återförsäljaren före systemet tas i bruk. I Bilaga 1 finns larm och inställningar uppräknade.

Avlägsning av CARE-klockan

När du tar av dig klockan, lämna den inte i direkt solsken på fönsterbrädet eller på bilens instrumentbräda. Klockan kan skadas av värmen. Lämna heller inte klockan inom räckhåll för barn eller husdjur. Klockan känner automatiskt av om den sitter på armen. När du har tagit av dig klockan, växlar texten i datumfältet mellan WRIST och datum. Efter 2h* skickar klockan ett "klockan av" meddelande till larmmottagaren. Larmen skickas bara om klockan är inom Domi POINTs räckvidd.

Kom ihåg att sätta fast klockan på handleden på nytt så snabbt som möjligt. Om inte klockan har använts under en längre tid, rekommenderas att du gör ett testlarm före du tar klockan i bruk.

Dusch, bad och bastu

Du kan ha på dig klockan i duschen eller i badet. Ta av dig klockan medan du badar bastu.

Om du inte kommer ihåg att sätta på klockan igen, skickas ett "klockan av" meddelande efter 2h* till larmmottagaren.

Rengöring

Det är viktigt att klockan rengörs regelbundet för att säkerställa mätfunktionen. Det är bra att rengöra klockan en gång i veckan om den används kontinuerligt. Rengör särskilt klockans undersida med en trasa som är fuktad med vatten. Du kan använda en mild tvål- eller diskmedelslösning. Torka klockan noggrant med en torr handduk.

Använd inte tvättmedel, som innehåller lösningsmedel såsom alkohol (etanol), aceton, toluen, isopropanol osv. Detta kan skada klockans plastdelar. Skrapa eller gnid inte klockan.

När man går ut

Du kan fritt röra dig med klockan. Om du går ut, håll klockan runt handleden. Du behöver inte meddela att du går ut eller trycka på någon knapp. När du gått ut skickar DOMI ett "Kontakt med basstationen av" larm till larmmottagaren, se Bilaga 1 för detaljer.

Fastän du är utom räckhåll för Domi POINT, fortsätter klockan att följa med din aktivitet. Ta inte av dig klockan när du går ut, så att inte uppföljningen av din aktivitetsnivå avbryts. Du kan, var som helst, från klockan följa med din aktivitetsnivå samt sömntid. Dessutom kan klockan även användas som en normal klocka.

Systemet kan sända larm endast när du är hemma, högst ungefär 20 meter från Domi POINT trygghetstelefonen. I trävillor är det möjligt att basenhetens räckvidd täcker också vissa delar av din gård. Det är möjligt att testa räckvidden med testlarm. Kom överens om testlarmen med Vivago återförsäljaren.

Långvarig frånvaro

När du åker på semester eller av annan orsak är borta hemifrån en längre tid, kan du ta av dig klockan. Meddela om din frånvaro åt larmmottagaren. Bryt inte hemmets ström från huvudströmbrytaren och lösgör inte trygghetstelefonens elsladd från vägguttagen. Meddela larmmottagaren när du kommit hem igen.

Kom ihåg att ladda Vivago CARE -klockan och gör ett testlarm när du kommit hem och tar klockan i bruk igen.

(*Ifall du vill ändra på inställningarna kontakta din Vivago återförsäljare.)

Användningen av Vivago CARE -klockan



Bild 5a Vivago CARE -klockan visar en batterisymbol när batteriet är nästan tomt.



Bild 5b Vivago CARE klockan kopplad till laddaren.

Laddning

Klockan har ett batteri, som emellanåt måste laddas. Efter att ha laddats räcker batteriet cirka 2-4 månader. DOMI-paketet innehåller en laddare för klockan.

När klockans batteri börjar ta slut, visas en batterisymbol till vänster i displayen, se Bild 5a. Dessutom blinkar "BATT"-texten i displayen och ett meddelande "Batteri tomt" sänds.

Koppla in laddaren i vägguttaget och i klockan enligt bifogad bild, se Bild 5b. Klockan bör laddas så snabbt som möjligt efter första batteri tomt-meddelande. Om batteriet tar slut och klockan har slockna, startas klockan automatiskt då den börjar laddas. Säkerställ att laddaren sitter åt rätt håll i klockan, så att laddarens kontakter rör laddningskontakterna på klockans undersida.

Laddaren placeras på Mode-knappens sida på klockan. Det tar cirka 1-2h att ladda klockan.

När laddaren har kopplats in korrekt och batteriet laddas, visas laddningens fortgång på en bild i displayen. När batteriet är färdigladdat och laddaren fortfarande sitter kvar i klockan, visar klockan en bild på ett fulladdat batteri. Ett meddelande skickas till larmmottagaren om att batteriet är fulladdat. Du kan avlägsna laddaren från klockan och vägguttaget.

OBS! Om batteriet är inte fulladdat eller om laddningen avbryts, försvinner inte batterisymbolen. När batteriet är fulladdat försvinner batterisymbolen.

Service, liability and warranty

Vivago DOMI installation

Vivago

Service

Regelbunden rengöring av klockan är nödvändig för att säkerställa apparatens funktionsduglighet. Klockan bör rengöras minst en gång i veckan med en fuktig, mjuk duk som inte luddar. Klockans batterier bör laddas med 2-4 månaders intervall. Systemet sänder ett larm när batteriet är nästan slut. Vivago ansvarar för alla Vivago produkters service. Kontakta Vivago återförsäljaren när du är i behov av service.

Ansvar

Vivago-systemet iakttar sin egen funktionsduglighet. Om det uppstår ett fel i apparaten sänder det automatiskt ett larm, varvid larmmot-tagaren kan vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera situationen. Klockans funktioner motsvarar inte apparater som används för övervakning av hälsotillstånd. Det finns situationer, där klockan kan låta bli att alarmera och å andra sidan kan mycket små förändringar i användarens fysiologiska tillstånd eller aktivitetsnivå orsaka ett larm.

Tillverkaren ansvarar inte för de felfunktioner i systemet, som förorsakas av att apparaten inte har använts eller skötts i enlighet med bruksanvisningarna eller för situationer där närverket har förorsakat att larmet inte skickats vidare till larmmotagaren.

Garanti

Vivago DOMI har 24 månaders garanti från köp ögonblicket. Garantin täcker sådana reparation-skostnader som anknyter till fel vid hopsättning, tillverkning eller i råmaterial. Garantin täcker inte sådana skador, som förorsakas av felaktig användning av apparaturen eller användarens vårdslöshet. Garantin täcker inte heller sådana skador, som förorsakas av att apparaturen inte har använts och skötts enligt bruksanvisningarna, eller av en yttre omständighet, som är utom räckhåll för tillverkarens inflytande, eller som beror på normalt slitage. Tillverkaren är under inga omständigheter ansvarig för indirekta skador, som förorsakas av att systemet inte sänder ett larm.

Domi POINT programmering

Endast auktoriserade servicepunkter får programmera Domi. Misstag vid programmering kan förhindra systemets normala funktion och kan upphäva produktgarantin.

Om du vill ändra på larmmottagens telefonnummer eller andra inställningar av Domi POINT, var vänlig och kontakta Vivago återförsäljaren.

Domi POINT placering

Vi rekommenderar att Domi POINT placeras på ett centralt ställe i lägenheten för att säkerställa tillräcklig räckvidd samt bra hörbarhet; btra ställen till exempel i tamburen eller i sovrummet. För att säkra förbindelsen mellan klockan och basenheten, bör man inte placera Domi POINT i närheten av en dator, stereoanläggning, television, lysrör eller ventilationsöppningar. Placera Domi POINT så långt som möjligt från elsystemets huvudtavla.. Tjocka stenväggar och metallkonstruktioner kan förhindra klockans förmedling av information till Domi POINT.

Domi POINT räckvidd

Larmen överförs bara då när klockan är i kontakt med Domi POINT, räckvidden är ungefär 20 meter. Beroende på byggmaterialet kan det hända att räckvidden täcker även en del av trädgården. Räckvidden kan mätas genom testlarm. Kom överens om eventuella testlarm med Vivago återförsäljaren.

Vivago CARE

-klockans inställningar

Viktigt!

Klockan ersätter INTE medicinsk vård.
Man får aldrig låta användningen av Vivago
-klockan fördröja uppsökande av medicinsk
hjälp.

Allmänt

- Klockan kan hjälpa dig endast genom att sända ett automatiskt larm eller ett manuellt larm du själv gjort genom att trycka på klockans tryckknapp. Försäkra dig om att du förstår apparatens funktionsändamål och begränsningarna i säkerheten den ger.
- Klockan är en säkerhetsanordning, som har programmerats att meddela om förändringar i din aktivitetsnivå i så stor utsträckning som möjligt, men klockan kan inte observera alla avvikelser. På grund av detta bör du aldrig dröja med att kalla på hjälp.
- Vid nödfall bör man inte vänta på ett automatiskt larm; man ska alltid själv kalla på hjälp genom att trycka på larmknappen.
- Klockan övervakar ditt allmänna välbefinnande. Det bör inte användas för uppföljning av någon bestämd sjukdom.
- För att undvika falska larm bör klockan inte avlägsnas från handleden för natten. Klockan kan inte sända ett automatiskt larm, om det inte sitter runt handleden.
- Sändande av larm lyckas endast när basenheten får elektricitet från nätströmmen eller tillfälligt från reservbatteriet och är kopplad till mobilnätverket.

- Förändringar i medicineringen eller oregelbunden dosering kan förorsaka larm.
- I vanliga fall sänder systemet inte ett larm automatiskt om användaren själv kan kalla på hjälp eller om förändringen i aktivitetsnivån inte är märkbar. Till exempel ett värkanfall, mental förvirring, en långsamt nedgående aktivitetsnivå och andra förändringar leder nödvändigtvis inte till ett larm. Klockan skickar larm vid förändringar som sker jämfört med lagrad information om aktivitetsnivån.
- Vivago CARE -klockan har tillverkats av material som inte irriterar huden; om du ändå lägger märke till allergiska reaktioner, kontakta återförsäljaren.
- Efter att systemet meddelat klockan batteri håller på att ta slut måste klockan laddas inom 3 dagar. Om batteriet tar slut kan du inte kalla på hjälp med hjälp av klockan.
- Stora förändringar som sker inom loppet av några dagar eller tillfälliga fluktuationer i aktivitetsnivån kan förvränga armbandets studerade användningsprofil och på så sätt inverka på funktionstillförlitligheten.
- Både en mycket tunn hud och en ansenlig svullnad i området runt handleden kan förorsaka funktionsstörningar.
- Rengör inte med vätskor som innehåller alkohol.
- Försök inte öppna klockan, eftersom du kan skada den. Endast servicepunkter godkända av Vivago får göra det.
- Produktens delar får inte fällas eller omskakas och de bör skyddas från alla stötar. En hårdhänt hantering kan skada känsliga komponenter inne i produkten.
- Produkten får inte målas. En färgyta kan hindra dess normala funktion.
- Använd bara sladdar som kommer med i DOMI-paketet.
- Systemet kan modifieras enligt individens behov. Olika larm kan vid behov kopplas av eller på genom distansprogrammering. Kontakta återförsäljaren.
- Systemets funktion baserar sig på överföring av radiosignaler och mobilnätet, vars felfria funktion inte alltid kan garanteras.

Bilaga 1:

Vivago Domi POINT -trygghetstelefonens larmtyper och inställningar.

Om du vill ändra på inställningarna, kontakta Vivago återförsäljaren.

	Larmtyp	Inställningar	Standardvärde	Individuell
Akuta larm	Tryckknappslarm	Manual alarm blockeringstid 10 sek–30 min	10 sek	X
	Avvikande tillstånd	Snabb, Normal, Långsam, Långsammast	Normal	X
	Temperaturlarm			
Individuella larm	Hög aktivitet	Aktivitetsgräns, tiden som överskrider gränsen		X
	Låg aktivitet	Aktivitetsgräns, tiden som underskrider gränsen		X
Meddelanden	Passivitetsmeddelande			
	Aktivitet dagtid låg	Sensitivitet, värde för ändring		X
	Svag dygnsrytm	Sensitivitet, värde för ändring		X
Personen ute	Förbindelse till klockan avbruten	Larmfördröjning: 15 min–240 min eller inte i bruk	120 min	X
	Förbindelse till klockan ok			
Om kopplingsenheten används	Användaren ute	240 min: 1 min – 60 min eller inte i bruk	Not in use	X
	Användaren hemma			
Vivago CARE -klockans tekniska larm	Klockans batteri laddas			
	Klockans batteri tomt			
	Klockans batteri fullt			
	Klockans batteri laddas			
	Klockan av	Larmfördröjning: 5 min – 240 min eller inte i bruk	120 min	X
	Klockan på igen			
	Klockan löst			
	Klockans kontaktströrning			
	Klockans funktionsstörning			
Domi POINT tekniska larm	Basstationens nätströmsavbrott			
	Basstationen nätström ok			
	Basstationens batteri nästan slut			
	Basstation inte i användning	Larmfördröjning: 1 h – 72 h	3 h	X
	Basstation OK			
	Återuppringning efter larm	Tid 1 min – 60 min	15 min	X

Bild 2:

Kopplingsenheter för
Vivago DOMI -trygghetstelefonen

Kopplingsenhet	Förklaring	ID
Kopplingsenhet	Larmknapp	DI-2 IP
Vårdare på plats	Larmknapp och knappar för att mäta vårdtiden	DI-2-N IP
Kopplingsenhet med extern magnet switch	Dörrövervakning	DI-2-X IP
Kopplingsenhet för dörrövervakning	Knapp för vårdaen att kringgå dörrlarmen	DI-2-B IP

Bilaga 3:

Dokument för Vivago DOMI*

Dokument kan laddas från:
<http://www.vivago.com/domi/>
<http://www.vivago.fi/domi/>

Guide	Description	ID
Vivago DOMI Quick reference guide	Installing guides included in the Vivago DOMI POINT care phone package	C9044v1.0
Vivago CARE watch Quick Reference Guide	A guide included in the Vivago CARE Watch package	CEN0145v1.0
Vivago CARE watch User's guide for sheltered homes	Detailed guides for using the watch, its settings and displays.	CEN0146
Vivago CARE 8001 fact sheet	CARE 8001 – technical facts	CEN9010
Vivago Domi POINT fact sheet	Domi POINT – technical facts	CEN9040
Vivago Vista 6 User guide v6.2	A user guide for Vivago Vista software	**)

*) Finns på engelska och finska

**) Bara för återförsäljare

Kontaktinformation

Vivago Ab

Itsehallintokuja 6
02600 Esbo, Finland

MOMS nummer

0967287-4

Tel: +358 10 219 0610

E-post: info@vivago.com

Försäljning

myynti@vivago.com

Kundsupport

tuki@vivago.com